



## 1. Авторизация в программе-загрузчике

После запуска программы необходимо ввести электронный адрес и пароль.

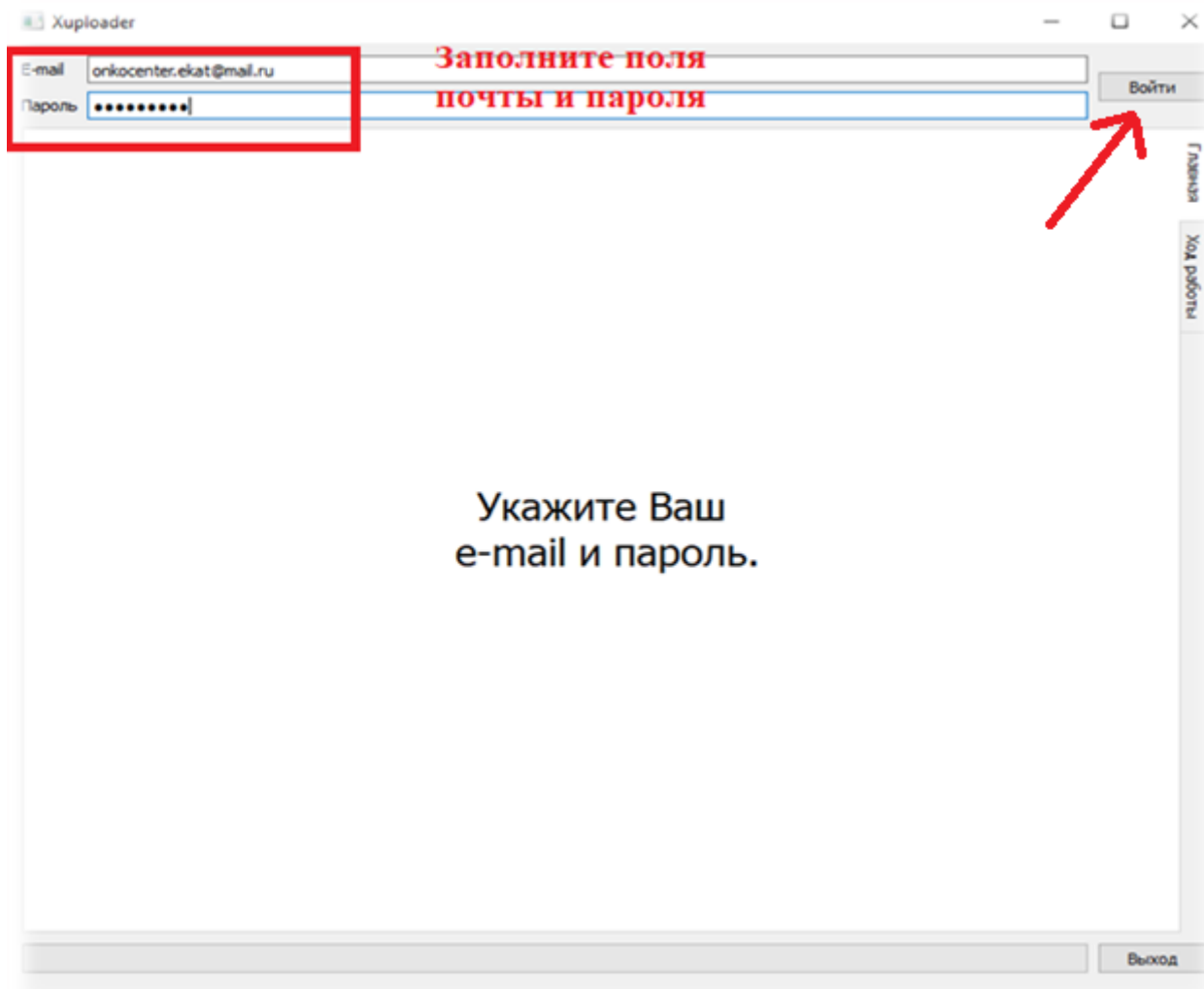


1.2 После того, как Вы ввели электронный адрес и пароль, нажмите кнопку «Войти»

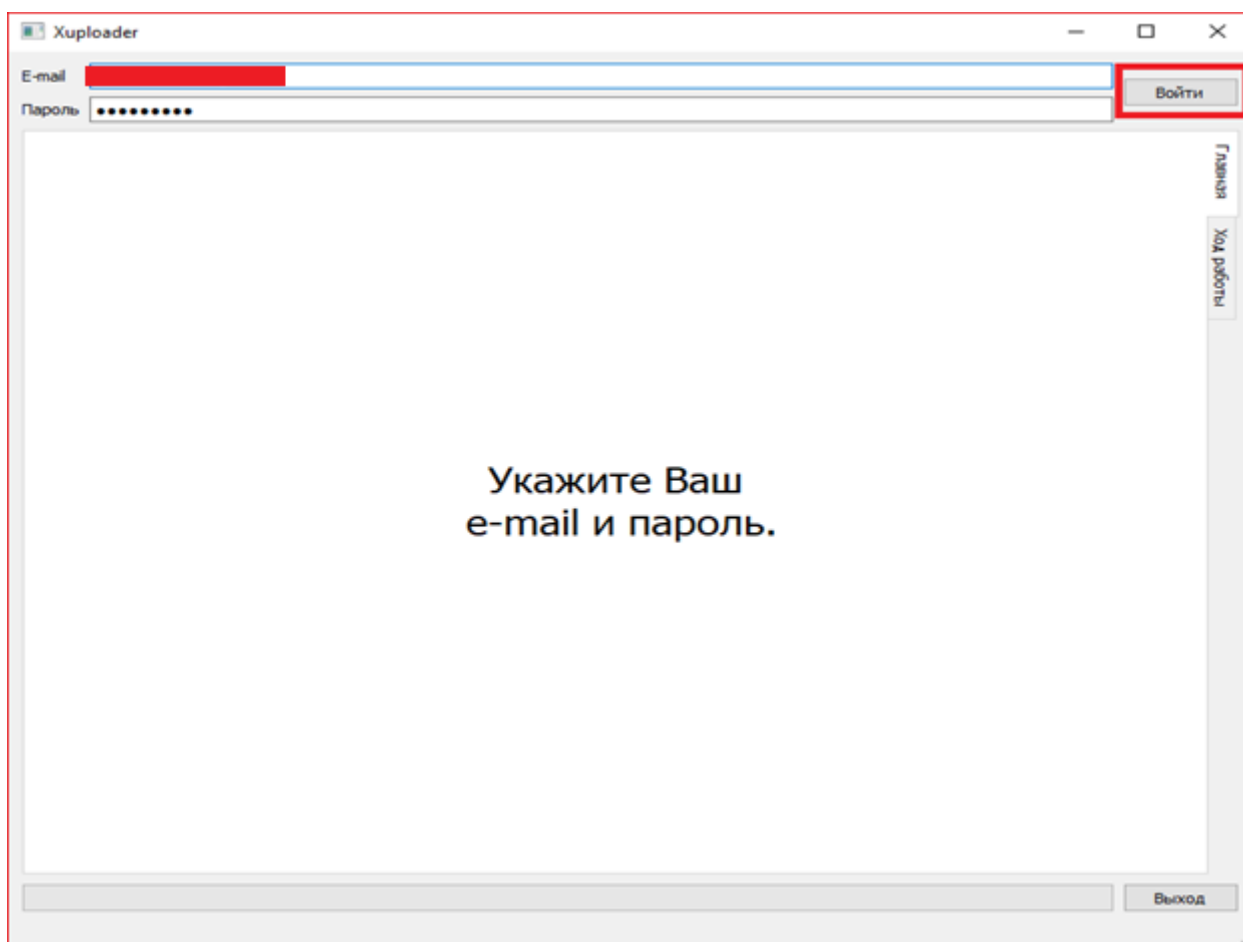

## 2. Изучение инструкции

Пожалуйста ознакомьтесь с порядком действий необходимых для загрузки.

После знакомства необходимо нажать кнопку далее>

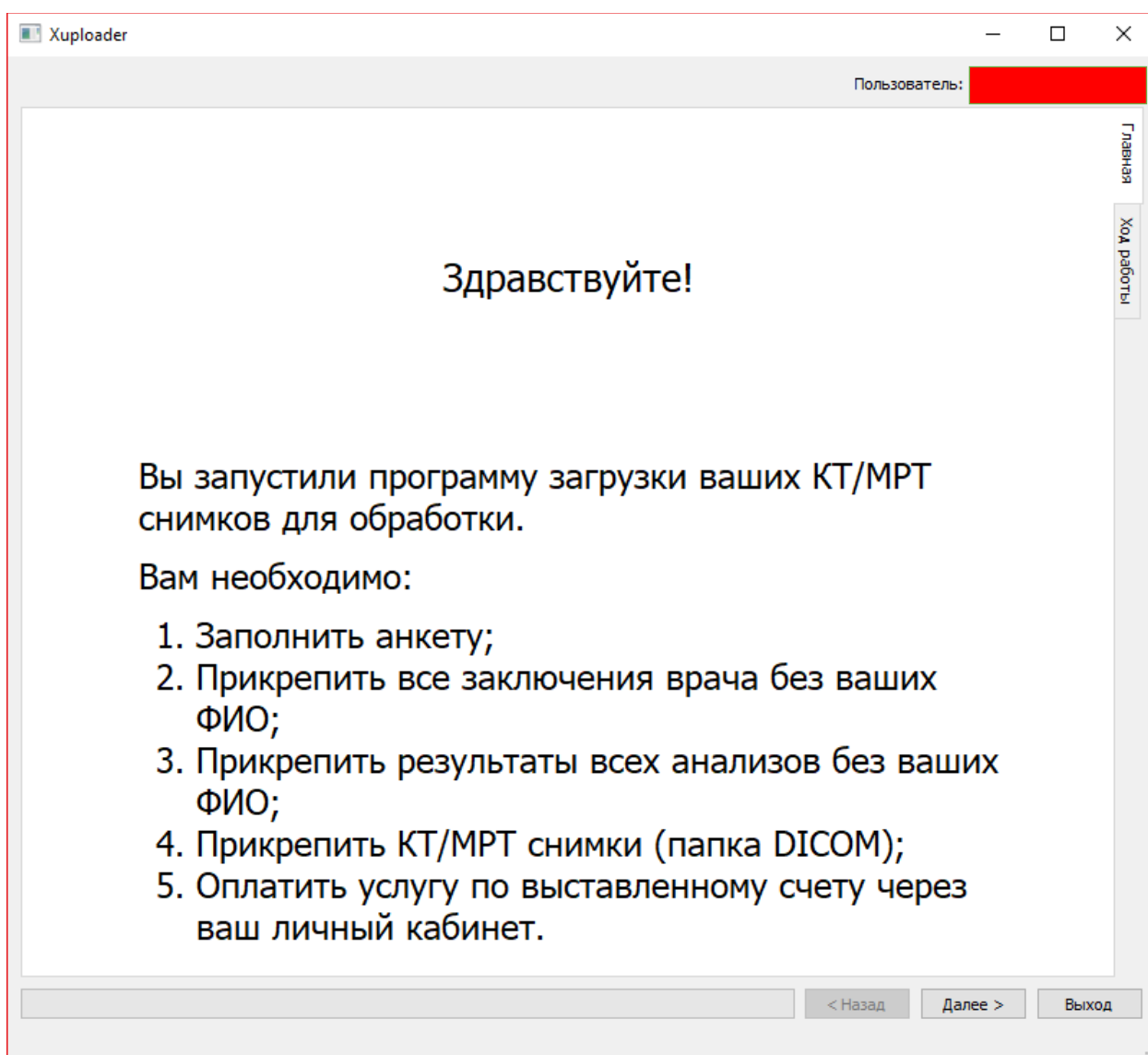

### 3. Заполнение анкеты

Пожалуйста заполните анкету пациента. Поля отмеченные ! обязательны для заполнения. Полнота представленной информации о пациенте определяет точность диагностики.

После заполнения анкеты необходимо нажать кнопку далее>

The screenshot shows a web application window titled 'Xuploader' with a user profile icon. The main heading is 'Заполните анкету.' (Fill out the questionnaire). The form contains the following sections:

- 1. Цель вашего обращения:** A text input field containing 'Анализ снимков КТ и МРТ'. A red box highlights a red exclamation mark icon to the right of the field.
- 2. Пол:** A dropdown menu with 'Мужской' selected. A red box highlights the dropdown and a red exclamation mark icon to its right.
- 3. Возраст:** A dropdown menu with '18-30' selected. A red box highlights the dropdown and a red exclamation mark icon to its right.
- 4. Рост:** A numeric input field with '0'.
- Вес:** A numeric input field with '0'.
- 5. Семейное положение:** A text input field.
- Количество детей:** A numeric input field with '0'.
- 6. Семейный анамнез:** A text area with the instruction 'Просим указать серьёзные проблемы со здоровьем в семье и у близких родственников.'
- 7. Последнее общемедицинское обследование:** A dropdown menu with 'Декабрь 1993' selected. A red box highlights the dropdown and a red exclamation mark icon to its right.
- 8. Перенесённые заболевания до момента обращения:** A list of checkboxes:
  - Заболевание сердца
  - Инфаркт миокарда
  - Кости свободных нижних конечностей
  - Давление (повышенное, пониженное)
  - Нарушение свертываемости крови
  - Заболевание печени, почек
  - Сахарный диабет
  - Туберкулез


At the bottom of the form, there are three buttons: '< Назад', 'Далее >', and 'Выход'. A vertical sidebar on the right contains 'Главная' and 'Ход работы'.

#### 4. Выберите области интереса

В следующем окне необходимо отметить интересующие органы для исследования. По выбранным органам сформируется области исследования.

Для выбора области, наведите курсор мыши на человечка в левой части экрана Загрузчика. При этом попавшая под курсор зона изменит свой цвет на серый.

После выбора необходимо нажать кнопку далее>

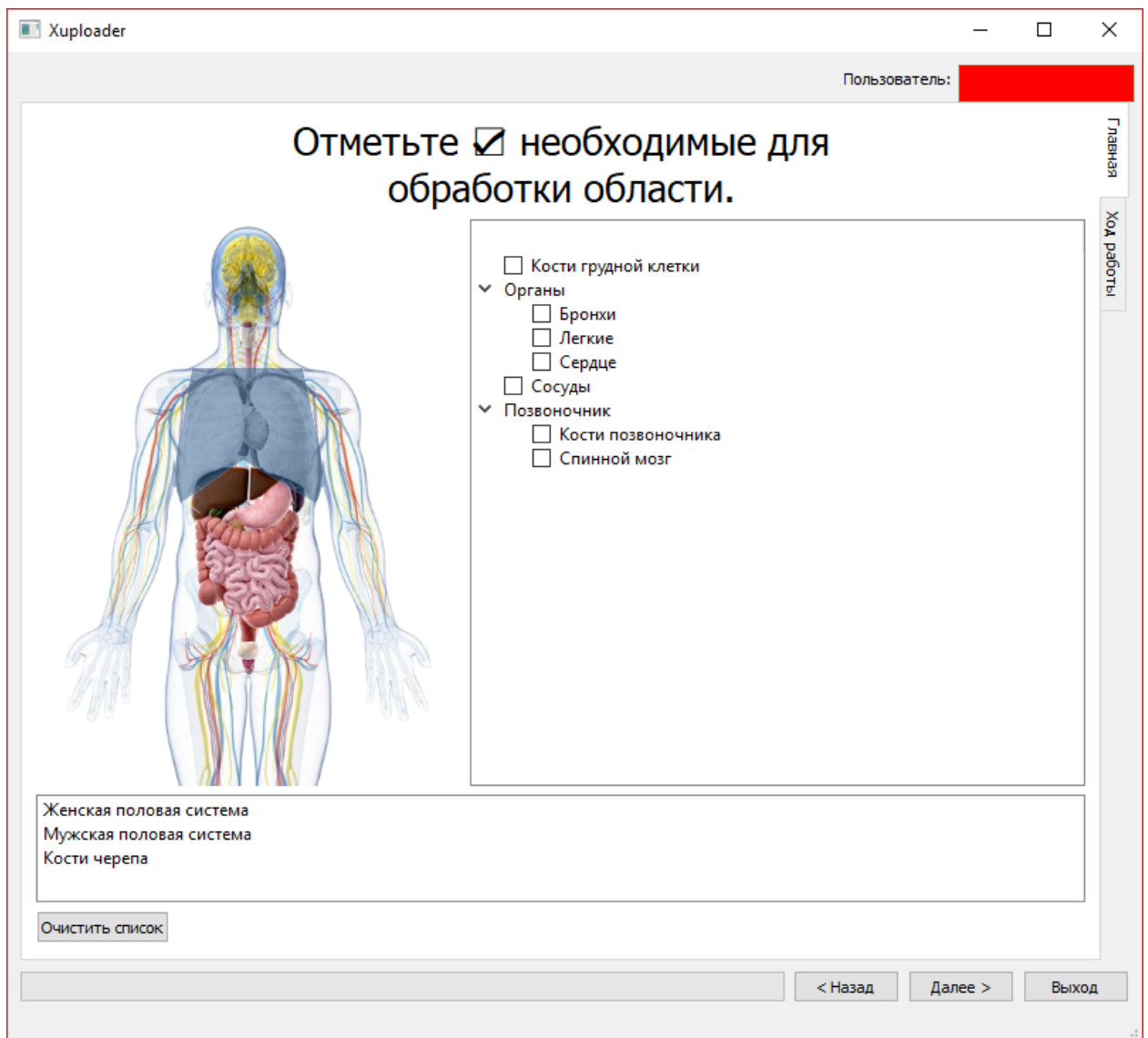


## 5. Загрузка документов (заключений)

В данном документе прикладываются такие документы как:

- рентгенологическое заключение (**является обязательным**)
- анамнез / эпикриз;
- результаты анализов крови;
- другие документы пациента характеризующие его текущее состояние.

Диалоговое окно по выбору файлов открывается при нажатии кнопки «Добавить файл».


После необходимо нажать кнопку далее>

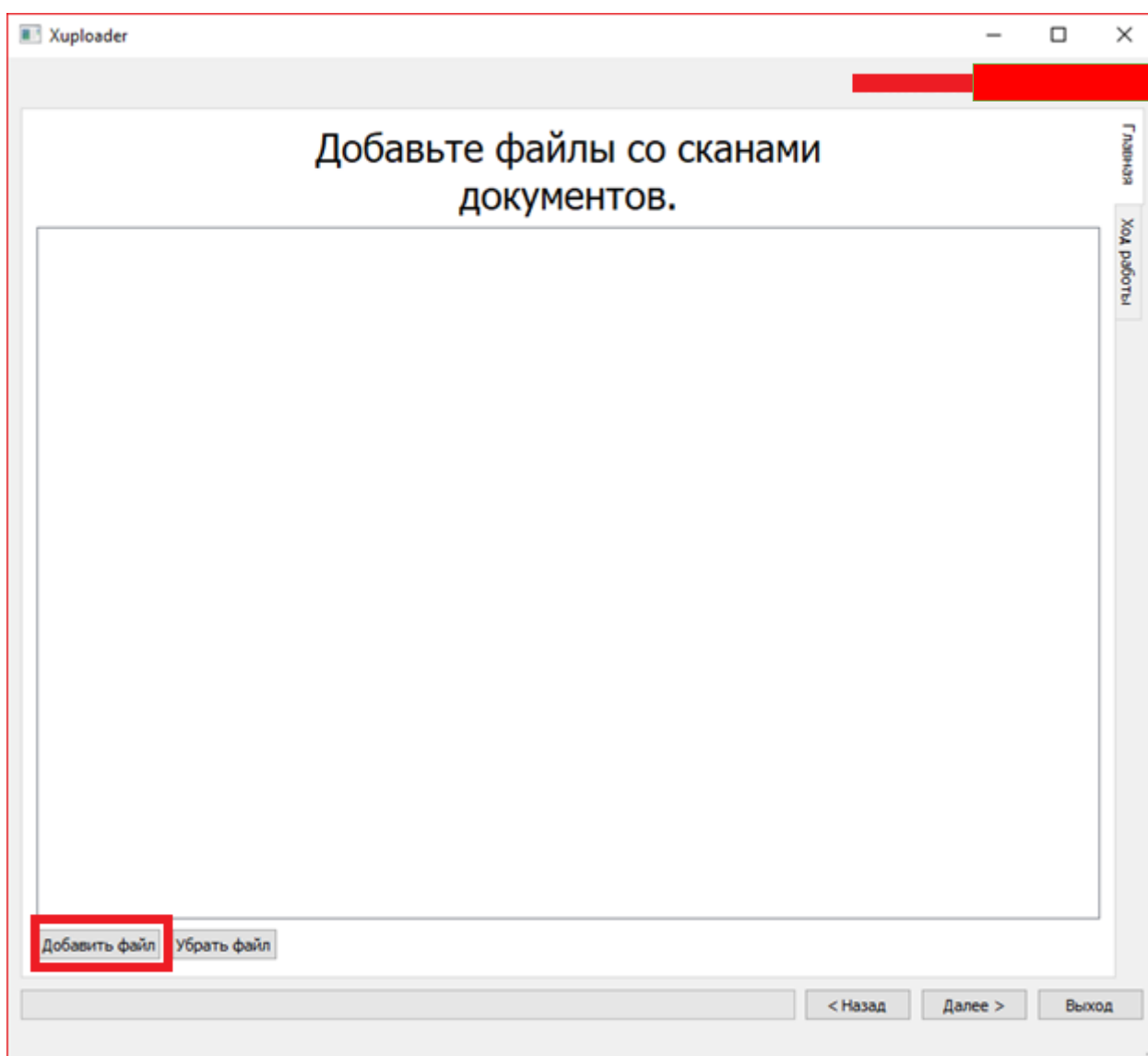

## 6. *Комментарий*

На данном этапе можно оставить комментарий в виде заключения рентгенолога (если ранее оно не было приложено как документ), сформулировать цели и задачи обращения и обработки или предоставить иную важную на ваш взгляд информацию о пациенте.

После необходимо нажать кнопку далее>

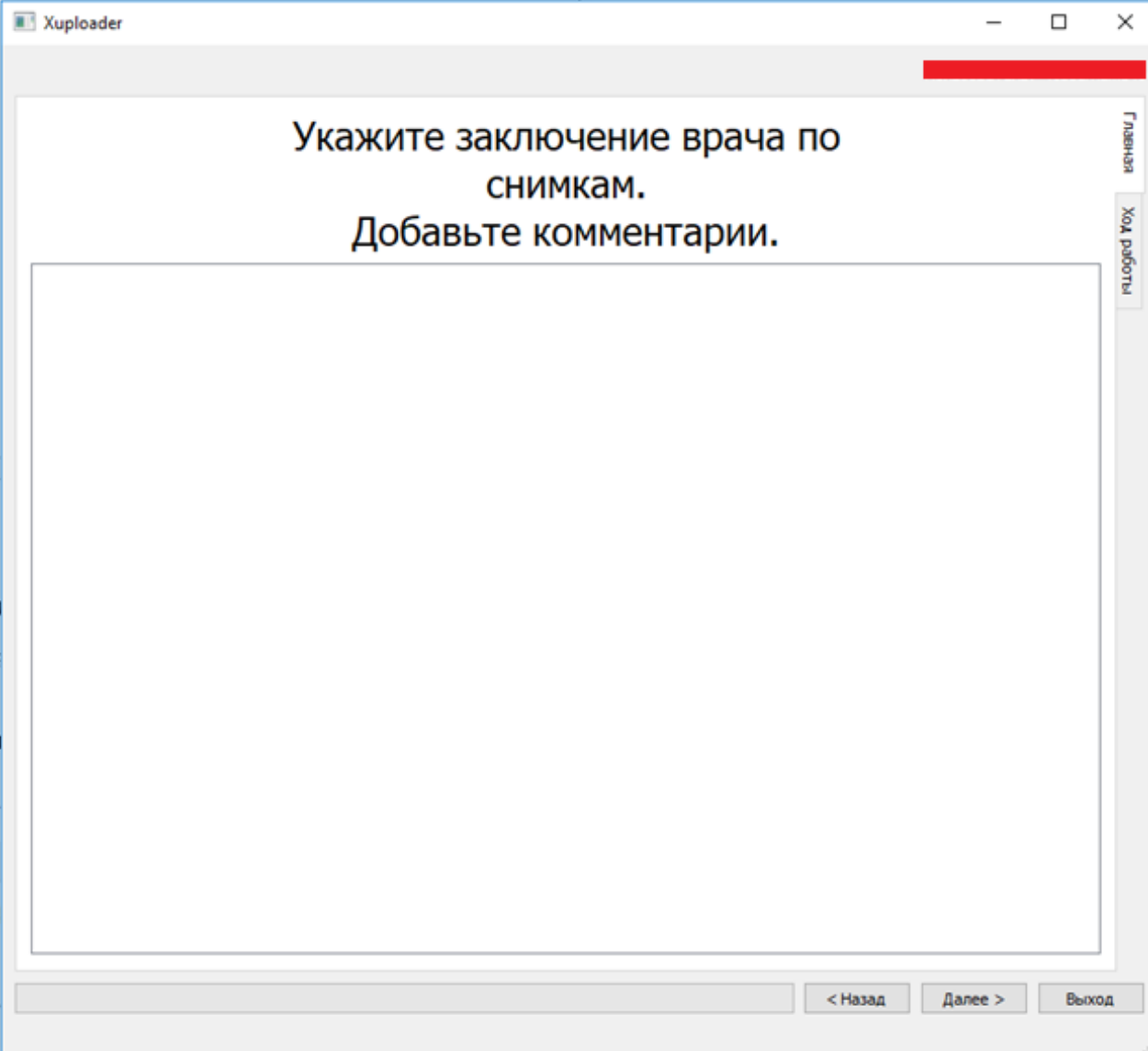

The screenshot shows a window titled "Xuploader" with a red progress bar at the top right. The main content area contains the following text:


Укажите заключение врача по снимкам.  
Добавьте комментарии.

Below the text is a large empty rectangular box for input. On the right side of the window, there is a vertical sidebar with two buttons: "Главная" (Home) and "Ход работы" (Work progress). At the bottom of the window, there are three buttons: "< Назад" (Back), "Далее >" (Next), and "Выход" (Exit).

## 7. Выбрать снимки (DICOM)

Нажмите кнопку «добавить папку» и в открывшемся диалоговом окне выберите папку в которой находятся снимки пациента (DICOM)

После необходимо нажать кнопку далее>

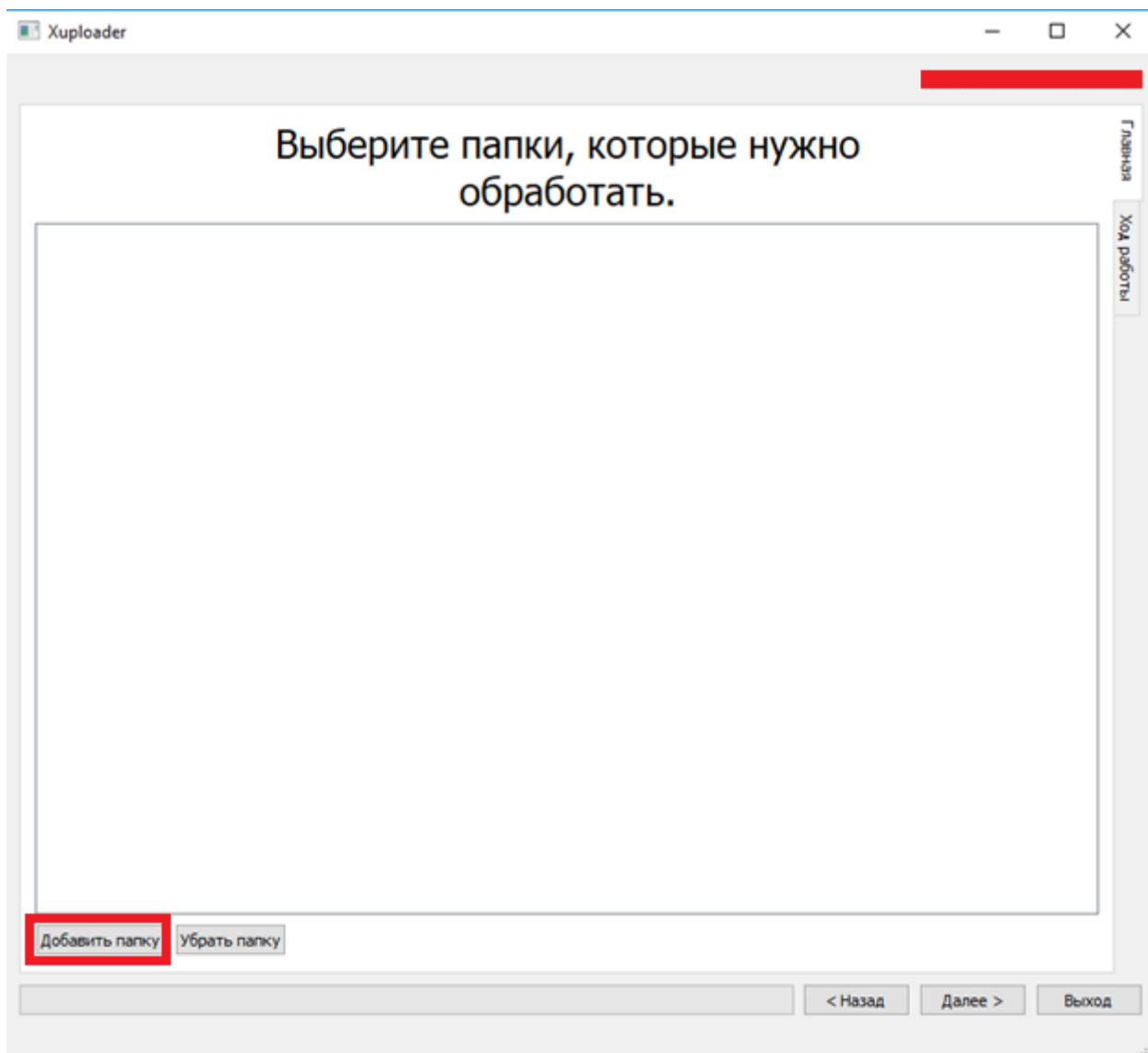




## 8. Проверка и загрузка

Ознакомьтесь с правильностью заполнения и приложенных документов на предыдущих этапах.

После выбора необходимо нажать кнопку «Начать загрузку». Начнется процесс удаления персональных данных с снимков и их отправка на сервер.

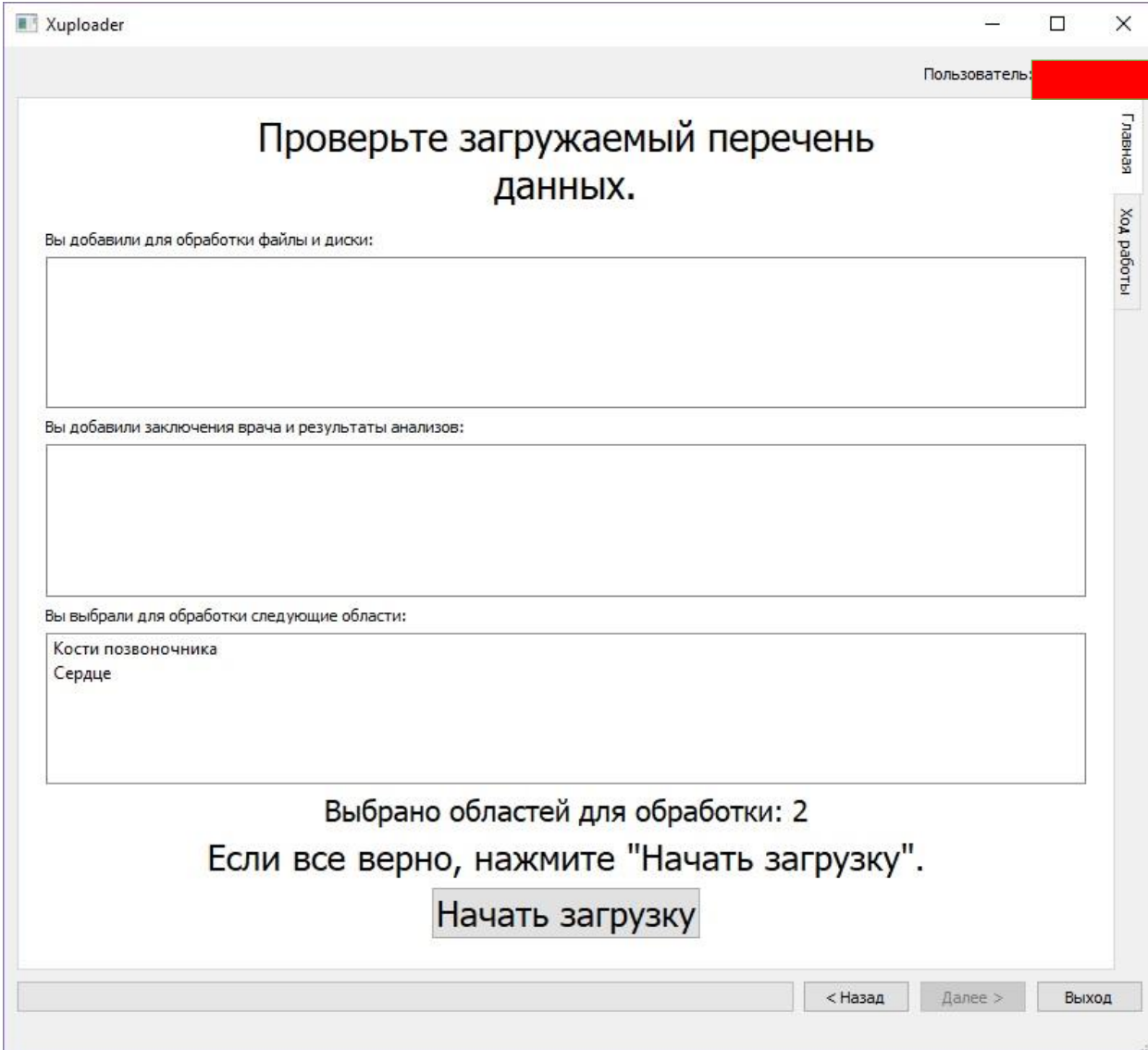

The screenshot shows a web browser window titled "Xuploader". The user is logged in as "Пользователь:" followed by a redacted name. The main heading is "Проверьте загружаемый перечень данных." (Check the data to be uploaded). The interface is divided into three sections for verification:

- Вы добавили для обработки файлы и диски:** (You added files and disks for processing): This section contains an empty rectangular box.
- Вы добавили заключения врача и результаты анализов:** (You added doctor conclusions and analysis results): This section contains an empty rectangular box.
- Вы выбрали для обработки следующие области:** (You selected the following areas for processing): This section contains a list of selected areas: "Кости позвоночника" (Vertebral bones) and "Сердце" (Heart).

Below these sections, the text reads: "Выбрано областей для обработки: 2" (2 areas selected for processing) and "Если все верно, нажмите 'Начать загрузку'." (If all is correct, click 'Start upload'). A button labeled "Начать загрузку" (Start upload) is highlighted. At the bottom of the window, there are navigation buttons: "< Назад" (Back), "Далее >" (Next), and "Выход" (Exit).